

KONFRONTATIONS-GESICHTSFELD

#53512

Das mit vier LED-Lichtern zur schnellen Prüfung des zentralen 30° Konfrontations-Gesichtsfeldes entwickelte Gerät erlaubt den schnellen, mobilen Einsatz bei verbesserter Prüfgenauigkeit gegenüber der Fingerperimetrie. Die Untersuchungszeit beträgt in der Regel weniger als eine Minute pro Auge.

Aufbau des Gerätes:

1,0 mm rote LED Dioden sind in jeder Ecke des Gerätes angebracht, in der Mitte befindet sich eine Beobachtungsöffnung. Das Gerät präsentiert in einer automatisierten, randomisierten Abfolge eine unterschiedliche Anzahl von roten Lichtpunkten, die der Patient benennen soll. Der Untersucher beobachtet das zu untersuchende Auge durch die Beobachtungsöffnung und kontrolliert die zentrale Fixation.

Das Konfrontations-Gesichtsfeld ist ein schwarzes Gerät mit den Außenmaßen 12 cm x 17 cm. Vier LED Dioden sind im Abstand von 11,25 cm angeordnet. Das Gerät wird mit 2 Standard AA Batterien betrieben.

Vertrieb/Distribution:

TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH
Konrad-Zuse-Str. 15
D - 33758 Schloss Holte-Stukenbrock
Tel: +49 5207 991688-0
Fax: +49 5207 991688-28
Email: info@tshs.eu
Onlineshop: www.eyesfirst.eu

ANL-KONFRON

TRU/A3/07-2014

1/1

MED/CERT

EN ISO13485:2012
+AC:2012