

**VAC PASS Test 2 & PASS Test 3 - Information**

**#54009/#54010**

Die PASS Stereoteste (**P**reschool **A**ssessment of **S**tereopsis with a **S**mile) wurden entwickelt, um einfache Testverfahren für Kinder im Vorschulalter oder leseunkundige Personen zu ermöglichen. Der Aufbau der Teste basiert auf dem Preferential Looking Prinzip. Ein Kartenset enthält immer eine Demonstrationskarte mit Smiley, eine Leerkarte und je nach Test 2 oder 4 Stereo-Testkarten. Die einfache Testdurchführung erlaubt schnelles Screening in Kinderarztpraxen, Frühförderstellen, Augenarztpraxen und Orthoptischen Einrichtungen.

**PASS Test 2:**

4 Karten (480", 240", Demokarte, Leerkarte), 2 Polarisationsbrillen, Englische Gebrauchsanweisung, Schutzhülle

**PASS Test 3:**

6 Karten (480", 240", 120", 60", Demokarte, Leerkarte), 2 Polarisationsbrillen, Englische Gebrauchsanweisung, Schutzhülle

**Durchführung:**

Der Test wird mit getragener Polarisationsbrille durchgeführt. Bei Brillenträgern werden die Polarisationsbrillen über die getragene Brille aufgesetzt.

Zeigen Sie zunächst die Demokarte („A“) mit dem aufgedruckten Smiley und fordern Sie das Kind auf, auf den Smiley zu zeigen.

Präsentieren Sie nach der Einführung die Demokarte und Leerkarte mehrfach dicht nebeneinander oder übereinander in unterschiedlichen Anordnungen und bitten Sie das Kind, auf den Smiley zu zeigen. Vermeiden Sie vorhersehbare Testanordnungen.

Führen Sie dies max. 5x durch. Die Teststufe gilt als bestanden, wenn 4 von 4 oder 4 von 5 Präsentationen korrekt benannt werden konnten.

Bei korrekter Erkennung der Karte „A“ führen Sie diesen Vorgang nun mit der Karte „B“ und Leerkarte durch, anschließend mit den Karten „C“ bis „E“ und Leerkarte, je nach verwendetem PASS Test. Wird eine Teststufe nicht richtig erkannt (s.o.), gehen Sie bitte zu der vorherigen Stufe zurück und überprüfen die Angaben nochmals.

Notieren Sie das Testergebnis wie folgt:

Notieren Sie die zuletzt korrekt erkannte Karte mit den Winkelsekunden (Beispiel: Karte „B“, 480"). Notieren Sie, falls das Kind das Tragen der Polarisationsbrille ablehnt oder die Demokarte nicht erkennen kann.

**Reinigung:**

Reinigen Sie die Karten mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel oder Wasser. Die Karten nicht in Wasser legen oder direkt mit einem Reinigungsspray ansprühen.

Reinigen Sie die Polarisationsbrillen mit einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie sie vorsichtig mit einem weichen flusenfreien Tuch.

**Vertrieb/Distribution:**

TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH  
Konrad-Zuse-Str. 15  
D - 33758 Schloss Holte-Stukenbrock  
Tel: +49 5207 991688-0  
Fax: +49 5207 991688-28  
Email: [info@tshs.eu](mailto:info@tshs.eu)  
Onlineshop: [www.eyesfirst.eu](http://www.eyesfirst.eu)

Anl-PASS

TRU/A3/07-2014

2/2

**MED/CERT**

EN ISO13485:2012  
+AC:2012

Trusetal Verbandstoffwerk GmbH  
Konrad-Zuse-Straße 15, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock (Germany)  
Geschäftsführer: Hartmut Otto, Amtsgericht Bielefeld HRB 34919  
Ust.-Id.-Nr. DE 811 775477  
Bankverbindung: Kreissparkasse Wiedenbrück, Konto 3010477, BLZ 47853520  
IBAN: DE55 4785 3520 0003 0104 77, SWIFT-BIC.: WELADED1WDB

Postanschrift:  
Postfach 14 43 · 33751 Schloß Holte-  
Stukenbrock (Germany)  
Tel. 05207/991688-0 · Fax 05207/991688-28  
Internet: [www.tshs.eu](http://www.tshs.eu) · Internet: [www.augenpflaster.com](http://www.augenpflaster.com)  
Internet-Shop: [www.eyesfirst.eu](http://www.eyesfirst.eu) · E-Mail: [info@tshs.eu](mailto:info@tshs.eu)