


L900 Tonojet Einmaltonometerköpfe

#53700

- Vergewissern Sie sich, dass die Umverpackung des Einmalkopfes unbeschädigt ist. Öffnen Sie die Umverpackung vorsichtig an der vorgesehenen Stelle der Umverpackung, ohne das Messkörperchen aus der Verpackung zu drücken.
- Platzieren Sie bei geöffneter Verpackung den Einmalkopf so, dass die Markierung von Kopf und Träger übereinstimmen.
- Ziehen Sie nun die Umverpackung vom Tonometerkopf ab.
- **ACHTUNG:**
Den Strahlengang der Spaltlampe auf die 0°-Position/Vertikalachse einstellen. Nun zur Messung den Strahlengang in einem Winkel von 10° bis 15° von der Vertikalachse bewegen.
Bei Einstellung auf die üblichen 60° fällt das Licht von außen auf den Messkörper und Sie können dann keine Messung durchführen.

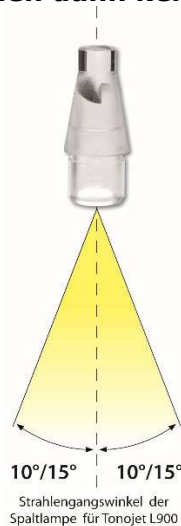

- Nun führen Sie die Untersuchung wie gewohnt aus.
- Nach Gebrauch das Einmalkörperchen bitte verwerfen.

Vertrieb/Distribution:

TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH
Konrad-Zuse-Str. 15
33758 Schloss Holte-Stukenbrock
Tel: +49 5207 991688-0
Fax: +49 5207 991688-28
Email: info@tshs.eu
Website: www.tshs.eu
Onlineshop: www.eyesfirst.eu

ANL-L900

TRU/A3/08-2014

1/2


MED/CERT

EN ISO13485:2012
+AC:2012

TONOJET L900

GRAFIK

#53700

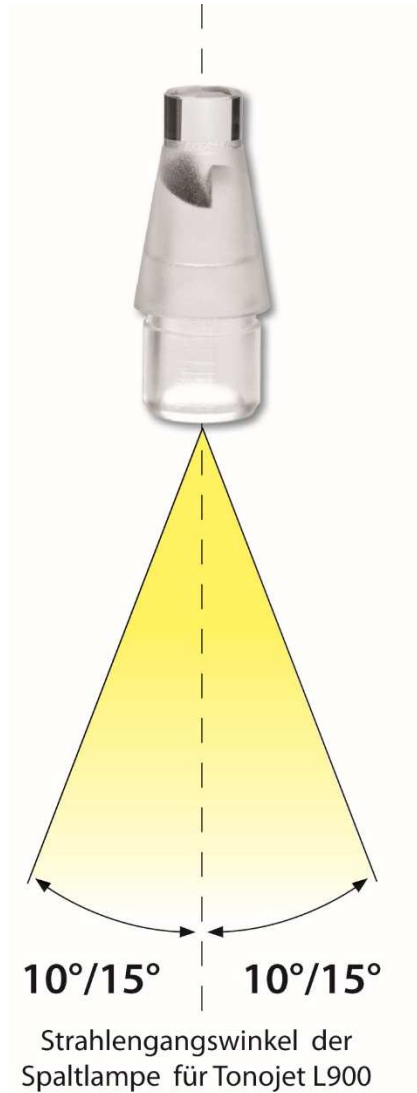

Vertrieb/Distribution:

TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH
Konrad-Zuse-Str. 15
D - 33758 Schloss Holte-Stukenbrock
Tel: +49 5207 991688-0
Fax: +49 5207 991688-28
Email: info@tshs.eu
Onlineshop: www.eyesfirst.eu

ANL-L900

TRU/A3/08-2014

2/2

MED/CERT

EN ISO13485:2012
+AC:2012

Trusetal Verbandstoffwerk GmbH
Konrad-Zuse-Straße 15, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock (Germany)
Geschäftsführer: Hartmut Otto, Amtsgericht Bielefeld HRB 34919
Ust.-Id.-Nr. DE 811 775477
Bankverbindung: Kreissparkasse Wiedenbrück, Konto 3010477, BLZ 47853520
IBAN: DE55 4785 3520 0003 0104 77, SWIFT-BIC.: WELADED1WDB

Postanschrift:
Postfach 14 43 · 33751 Schloß Holte-Stukenbrock (Germany)
Tel. 05207/991688-0 · Fax 05207/991688-28
Internet: www.tshs.eu · Internet: www.augenpflaster.com
Internet-Shop: www.eyesfirst.eu · E-Mail: info@tshs.eu