



TRUSETAL
VERBANDSTOFFWERK GMBH

L900 Tonojet Einmaltonometerköpfe - Anleitung

- Vergewissern Sie sich, dass die Umverpackung des Einmalkopfes unbeschädigt ist. Öffnen Sie die Umverpackung vorsichtig an der vorgesehenen Stelle der Umverpackung, ohne das Messkörperchen aus der Verpackung zu drücken.
- Platzieren Sie bei geöffneter Verpackung den Einmalkopf so, dass die Markierung von Kopf und Träger übereinstimmen.
- Ziehen Sie nun die Umverpackung vom Tonometerkopf ab.
- **Den Strahlengang der Spaltlampe aus der 0°-Position kommend in einem Winkel von 10° bis 15° von der Vertikalachse einstellen.**
- **Bitte beachten: bei Einstellung des Strahlenganges auf 60° fällt das Licht von außen auf den Messkörper und verunmöglicht eine Messung.**
- Nun führen Sie die Untersuchung wie gewohnt aus.
- Nach Gebrauch das Einmalkörperchen bitte verwerfen.

TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH
Konrad-Zuse-Str. 15
33758 Schloss Holte-Stukenbrock
Tel: +49 5207 991688-0
Fax: +49 5207 991688-28
Email: info@tshs.eu

TRU/A2/09-2013

MED/CERT

ISO 13485: 2003
+ AC: 2007

Trusetal Verbandstoffwerk GmbH
Konrad-Zuse-Straße 15, 33758 Schloß Holte - Stukenbrock (Germany)
Geschäftsführer: Hartmut Otto, Amtsgericht Bielefeld HRB 34919
Ust.-Id.-Nr. DE 811 775 477
Bankverbindung: Kreissparkasse Wiedenbrück, Konto 3010477, BLZ 47853520
IBAN: DE55 4785 3520 0003 0104 77, SWIFT-BIC.: WELADED1WDB

Postanschrift:
Postfach 1443 · 33751 Schloß Holte-
Stukenbrock (Germany)
Tel. 05207/991688-0 · Fax 05207/991688-28
Internet: www.tshs.eu · Internet: www.augenpflaster.com
Internet-Shop: www.eyesfirst.eu · E-Mail: info@tshs.eu